


# エアロチャンバー洗浄方法


- 1 後ろ部分とエアロチャンバー部分を外します。

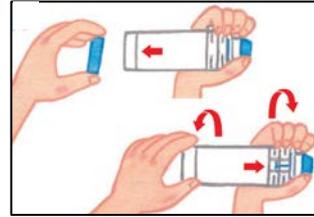


- 2 食器用中性洗剤を加えたぬるま湯に本体とパーツを15分ほど浸します。ゆっくりかきまぜ、清潔な水ですすぎます。内部にブラシ等の器具を挿入しないでください




食器洗浄機を使う場合は、最上段に上向きで部品を置き洗浄後、食器洗浄機から取り出してください。

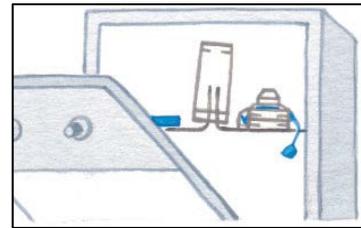


- 3 余分な水分を振り払い、縦に置いて自然乾燥させます。

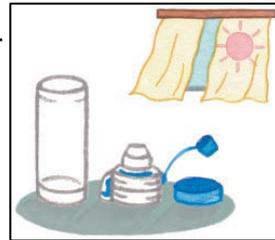

- 4 全パーツが完全に乾いたらはずした部分を元に戻します。マウスピース部をチャンバーの端に当て、しっかりと固定するまで回します。

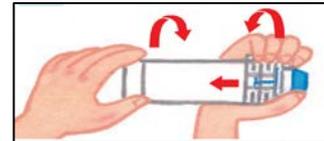

- 5 吸入器の接続部の中心点を、フローインジケータの中心線に合わせ、固定します。

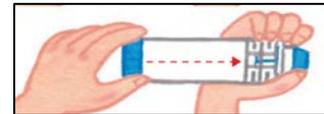

担当薬剤師意見欄

\_\_\_\_\_薬局 薬剤師氏名\_\_\_\_\_